



## 歩行補助杖の種類

参考元：一般財団法人保健福祉広報協会発行「福祉機器選び方・使い方副読本 基本動作編」

多脚杖





サイドウォーカー

ロフトランド杖

C字型

T字型

オフセットL型

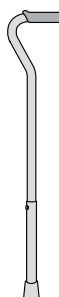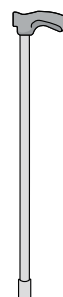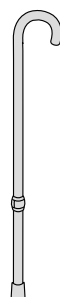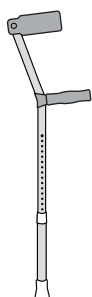

※現在お取扱いが  
ございません。

介護保険貸与対象

介護保険貸与対象外

## 杖の役割・使い方

参考元：一般財団法人保健福祉広報協会発行「福祉機器選び方・使い方副読本 基本動作編」


### 1 免荷

杖に体重を預けることで、足にかかる負担を減らすことができます。

### 2 バランスの補助


両足+杖を使用することで、からだを支える面積が増え、バランスがとりやすくなります。

杖なし

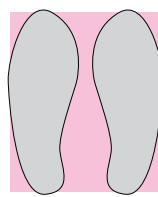

支持面積

杖あり

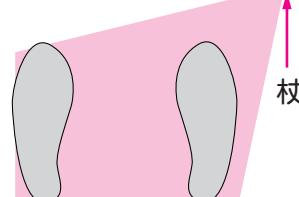

杖

### 3 歩行のリズム



歩行が不安定になると「イチ」「ニ」「イチ」「ニ」という二拍子のリズムで歩くことが難しくなります。そこで杖を使って、「イチ」「ニ」「サン」の三拍子のリズムでゆっくりと歩くことで、安定した歩行をサポートします。

二拍子のリズム

イチ♪ ニ♪  
患側の足 健側の足

三拍子のリズム

イチ♪ ニ♪ サン♪  
杖 患側の足 健側の足

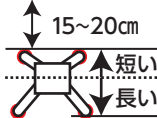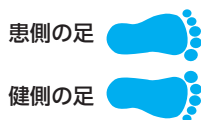


イチ♪ 杖を持ち上げて前に出す

ニ♪ 患側の左足を前に出す

サン♪ 右足を前に出す

力を抜いて自然に立ちます。杖をしっかり握り、地面に対して真下に押し使用します。杖を使用することで足を出すリズムがイチ♪(杖)、ニ♪、サン♪の三拍子になります。

グリップの握り方

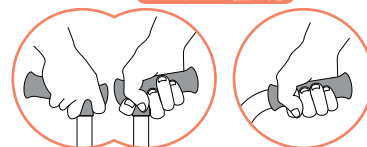

### カーボン四点可動式スモールタイプ

島製作所

非課税 重量 440g



カーボン柄グレー


支柱が前後に可動し路面に接地しやすい為、屋外や坂道などでも使用可能です。左右両用。

| 商品名              | 商品番号      | 商品コード        |
|------------------|-----------|--------------|
| 74MC-3(カーボン柄グレー) | 24-5510-0 | 00576-000033 |
| ご利用者負担額 (1割)     | 円 (2割)    | 円 レンタル月極価格   |

### オールカーボンオッドケイン四点式

島製作所

非課税 重量 400g

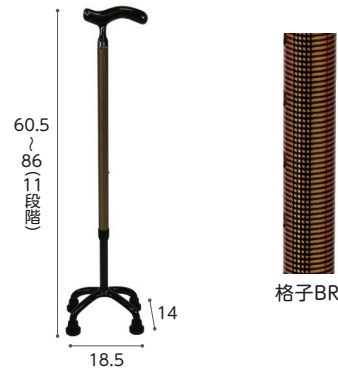

格子BR

グリップがT字の為、一本杖を使用してきた方も、違和感が少なくお使い頂けます。60.5cmまでグリップ位置が下がり、身長が低い方にもおススメです。左右両用。

| 商品名          | 商品番号      | 商品コード        |
|--------------|-----------|--------------|
| 70C-C1(格子BR) | 24-5467-0 | 00576-000031 |
| ご利用者負担額 (1割) | 円 (2割)    | 円 レンタル月極価格   |

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人  
徘徊感知  
機器

手すり

### テトラ・ケイン

田辺プレス

非課税 重量 S:440g

重量 M:460g



右・左の切替えができてにぎりやすいオリジナルグリップ。左右両用。

| 商品名                                 | 商品番号      | 商品コード        |
|-------------------------------------|-----------|--------------|
| テトラ・ケイン(青墨)S                        | 24-5449-0 | 01105-000001 |
| 材質:(杖) マグネシウム合金(石突キャップ・グリップ) イラストマー |           |              |
| 商品名                                 | 商品番号      | 商品コード        |
| テトラ・ケイン(青墨)M                        | 24-5450-0 | 01105-000001 |
| 材質:(杖) マグネシウム合金(石突キャップ・グリップ) イラストマー |           |              |
| ご利用者負担額 (1割)                        | 円 (2割)    | 円 レンタル月極価格   |

### 四点杖 CMS-40S

松永製作所

非課税 重量 980g



身長の高い方にも使いやすい長めのサイズ。左右両用。

| 商品名          | 商品番号      | 商品コード        |
|--------------|-----------|--------------|
| CMS-40S      | 24-5303-0 | 00066-000222 |
| ご利用者負担額 (1割) | 円 (2割)    | 円 レンタル月極価格   |

歩行  
補助杖

歩行器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

### 四脚杖 TY142S

日進医療器

非課税 重量 800g



小柄な方も使いやすい軽量、コンパクトタイプ。左右両用。

| 商品名                                 | 商品番号      | 商品コード        |
|-------------------------------------|-----------|--------------|
| TY142S                              | 24-0201-0 | 00175-000270 |
| 材質:(杖) マグネシウム合金(石突キャップ・グリップ) イラストマー |           |              |
| ご利用者負担額 (1割)                        | 円 (2割)    | 円 レンタル月極価格   |

### サイドウォーカー MRB-02031


ミキ

非課税 重量 1.75kg



サイドウォーカーの使い方  
(左側にまひのある場合)

- ・ご使用前に利用者様に合わせて脚部の長さを調節します。
- ・サイドウォーカーは右手で持ちます。
- ①サイドウォーカーを前に出す
- ②左足を出す
- ③右足を出す
- この動きを繰り返して進みます。

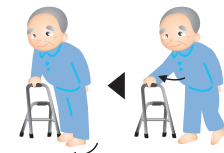

立ち上がりの支持や歩行バランスを保ち、体をしっかりサポート。歩行訓練にも。

| 商品名                               | 商品番号      | 商品コード        |
|-----------------------------------|-----------|--------------|
| MRB-02031                         | 24-5304-0 | 00122-000118 |
| 折りたたみ時: 全幅41.5~44×奥行7×全高78~90.5cm |           |              |
| ご利用者負担額 (1割)                      | 円 (2割)    | 円 レンタル月極価格   |

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報